


ENFILER ET RETIRER DES GANTS À USAGE UNIQUE 1/2

INTERVENTION DE L'OPERATEUR

Pratiquer une hygiène des mains avant d'enfiler les gants.



Prélever un gant de soins de son emballage d'origine

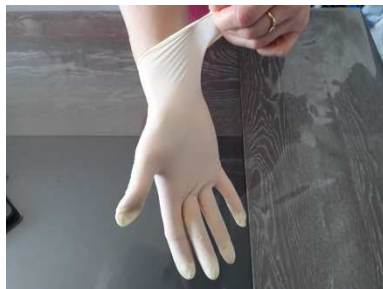

Enfiler le premier gant



Afin de ne pas toucher la peau de l'avant bras avec la main gantée, retourner la surface externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée, permettant ainsi d'enfiler le gant sur la seconde main.



Ne toucher qu'une surface limitée du gant correspondant au poignet (bord supérieur du gant)



Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu'une surface limitée du second gant, correspondant au poignet,



Une fois les gants enfilés, les mains ne touchent rien d'autre que ce qui est défini par les indications et les conditions d'usage des gants.

Signaler toute anomalie à votre supérieur hiérarchique

ENFILER ET RETIRER DES GANTS À USAGE UNIQUE 2/2




Pincer le gant au niveau de la paume de la main droite.




Tirer pour retirer le gant de la main gauche.



Former une boule dans la main Gauche avec le gant retiré.

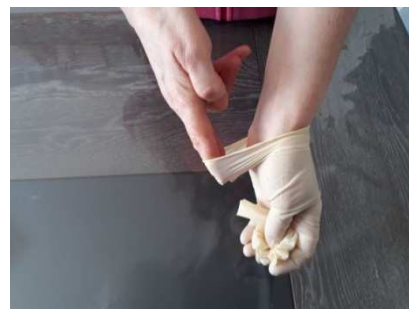

Insérer deux doigts de la main droite sous le gant de la main gauche, du côté de la paume.

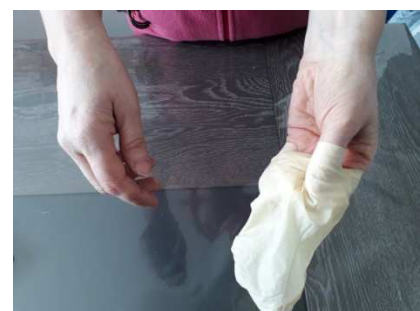

Avec la main droite, retourner le gant sur la main gauche pour couvrir la boule.



Terminer le retrait du gant de la main gauche en saisissant l'ensemble avec la main droite.

- **Ne pas porter les mains gantées au visage**
- **Jeter les gants dans un sac dédié et résistant, à fermer.**
- **Pratiquer une hygiène des mains après avoir retiré les gants.**

Signaler toute anomalie à votre supérieur hiérarchique